

TOP 10 DE VOS QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES

BROYEUR QUATTRO

+ Comment bien choisir le modèle de broyeur adapté à mes besoins ? >

- Le broyeur SOLO correspond à une **utilisation individuelle en chambre** (par exemple : chambre de réanimation...).
- Le broyeur QUATTRO correspond à une **utilisation collective dans un service comprenant jusqu'à 12 lits** (par exemple : gériatrie, soins palliatifs, urgence, chirurgie...).
- **NB** : quel que soit la dimension de votre projet, nous réalisons en amont une étude personnalisée et gratuite pour définir avec vous la solution la plus adaptée à vos besoins.

+ Pourquoi le broyeur Quattro est plus simple d'utilisation que le lave-bassin ? >

Comme vous pouvez le constater page 6 de la documentation commerciale du broyeur QUATTRO, le protocole d'utilisation du broyeur se déroule en 4 étapes à la différence de celui du lave-bassin qui en comprend 9. La porte du broyeur QUATTRO s'ouvre en moins de 2 secondes. Le soignant dépose les urinaux souillés puis grâce à la pédale, la porte se referme et le cycle démarre automatiquement. Il n'y a plus de gestion des urinaux souillés et de rangement des urinaux propres ou encore de produits à ajouter. Tout est simplifié pour le soignant.

+ Quels sont les principaux avantages du broyeur pour les équipes soignantes ? >

- 1 – Réduction du risque infectieux
- 2 – Réduction des odeurs
- 3 – Utilisation simple et rapide
- 4 - Réduction des tâches ingrates liées à la gestion des urinaux souillés et propres

+ Quels sont les principales fonctionnalités du broyeur Quattro? >

Le broyeur Quattro possède 4 fonctionnalités :

- 1 – Ouverture et fermeture électrique de la porte (avec le pied)
- 2 – Remplissage automatique de la cuve en eau
- 3 – Destruction complète du/des collecteur(s), des papiers, et des matières
- 4 – Vidange de la cuve et diffusion d'un désodorisant

TOP 10 DE VOS QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES

BROYEUR QUATTRO

+ Que dois-je prévoir pour installer le broyeur Quattro ? **>**

Les prérequis techniques sont simples :

- Une arrivée électrique avec disjoncteur différentiel
- Une arrivée d'eau froide
- Une évacuation comprise Ø50 et Ø100

+ Le broyeur est-il programmable ? **>**

- La quantité d'eau et le temps de cycle peuvent être programmés en fonction du nombre d'urinaux utilisés chaque jour.
- Le niveau sonore est paramétrable pour plus de confort. Il existe également un mode nuit permettant de réduire le bruit en allongeant légèrement la durée du cycle.

+ Quel est le coût de maintenance d'un broyeur par an ? **>**

Le coût de maintenance d'un broyeur Quattro par an (pièces détachées incluses) est compris entre 200 et 500€ par an.

+ Quelle est la prise en charge du broyeur en cas de panne ? **>**

Par sa simplicité de conception (tête de coupe + moteur), l'identification de la panne est simplifiée et la réparation facilitée.

+ Peut-on tout mettre dans le broyeur Quattro ? **>**

Le broyeur Quattro est prévu pour traiter uniquement les déchets biodégradables solubles tels que :

- Les supports en cellulose moulée de tout type (urinaux, plats-bassins, haricots, etc..)
- Les papiers (sachets papier, papiers WC)
- Les matières d'origine humaine ou animale
- Les sachets de gélifiants

Les supports plastiques, les seringues, les compresses, les pansements et les gants ne peuvent pas être traités par le broyeur.

TOP 10 DE VOS QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES

BROYEUR QUATTRO



En quoi opter pour le broyeur réduit l'impact environnemental de mon établissement ?



- L'utilisation de matériaux biosourcés/biodégradables 100% recyclables participe au respect de l'environnement.
- Le fonctionnement du broyeur Quattro requiert une utilisation très limitée de produits chimiques.
- L'énergie nécessaire à l'utilisation du broyeur Quattro est réduite par 10 rapport au lave-bassin.
- Par sa simplicité de conception, le broyeur Quattro tombe moins en panne que le lave-bassin entrainant ainsi une diminution de la fréquence et du nombre de pièces nécessaires à la réparation et l'entretien de mon équipement.



Où puis-je commander mes consommables ?



Vous pouvez passer commande directement sur notre site internet www.groupe-reval.com ou en vous adressant à l'un de nos commerciaux régionaux.



Le broyeur est-il vraiment moins cher à l'usage que le lave-bassin ?



Oui. Selon une étude qualitative réalisée en 2020 auprès d'un établissement utilisateur, il ressort que le broyeur QUATTRO est en moyenne autour de 25% moins coûteux à l'usage que le lave-bassin. Le niveau d'économie est encore plus significatif (de l'ordre de 43%) si l'on tient compte de l'économie de temps pour le soignant ! Il n'y a plus de stockage d'urinaux souillés, plus de rangement d'urinaux propres, plus d'attente entre les cycles, ce qui permet aux soignants de se focaliser sur les soins.